



G5 MASAJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

UYARILAR

- Cilt hastalığı olanlarda, yaralı, dikişli yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Çocuklarda kullanıma uygun değildir.
- Estetik operasyonlardan minimum 6 ay veya 1 yıl sonra doktorun iznine bağlı olarak kullanılabilir.
- Yüksek tansiyon hastalığı olanlar kullanmamalıdır.
- Hamilelik esnasında kullanılmamalıdır.
- Nemli yerlerde kullanılmaya ve sıvı temasına uygun değildir.
- Kalp pili olanlar, kalp rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır.
- Ağır cerrahi operasyon geçirmiş olan kişilerde kullanılmamalıdır.
- Varis sorunu olan kişiler G5 masajının olanaklarından faydalanamaz.
- Regl döneminde olan kadınların bu süreçlerinin bitmesi beklenir.
- Kendisine kanser ve de emboli teşhisi konulan kişilere de bu masaj yapılmamaktadır.
- Kullanım esnasında herhangi bir rahatsızlık duyulursa kullanılmaya devam edilmemelidir.



BAŞLIKLARIN KULLANIM ALANLARI

1 NO'LU BAŞLIK:

Yumuşak poliüretan süngerle kaplı bu aparat, daha çok kol, bacak, boyun ve omuz bölgelerinde masaj yapmak için kullanılır.

2 NO'LU BAŞLIK:

Poliüretan sünger aparat, yetişkinler üzerinde vücudun hassas bölgelerinde hafif masaj yapmak için kullanılır.

3 NO'LU BAŞLIK:

Yüzeyinde, masaj amaçlı orta kalınlıkta çıkıntılar bulunan başlıktır. Vücudun büyük bölümünde yüzeysel sirkülasyona yardımcı olan, masaj başlığıdır.

4 NO'LU BAŞLIK:

Yüzeyinde, masaj amaçlı ince bir çok çıkıntılar bulunan başlıktır. Vücudun büyük bölümünde yüzeysel sirkülasyona yardımcı olan masaj başlığıdır.

5 NO'LU BAŞLIK:

Üzerinde +'lü ya da 5' li büyük çıkıntılar bulunan aparat. Uyluk, sırt, omuz, karın kasları gibi ana kas gruplarında masaj için kullanılan başlıktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlerken kapatıp güç kaynağından çekiniz. Temizlerken kimyasal madde kullanmayınız. Bu cihazı suyun yakınında kullanmayınız. Amonyak içeren temizlik malzemeleri cihaza ve aparatlarına zarar verebilir. Cihazı kullanırken hortumuna zarar vermeden kullanmaya özen gösteriniz. Cihaz ve başlıklarını düşme ve çarpma gibi cihaza ve aparatlarına zarar verebilecek durumlardan koruyunuz.